




Diabetescare

mylife YpsoPump Reservoir Komfortabel & nachhaltig

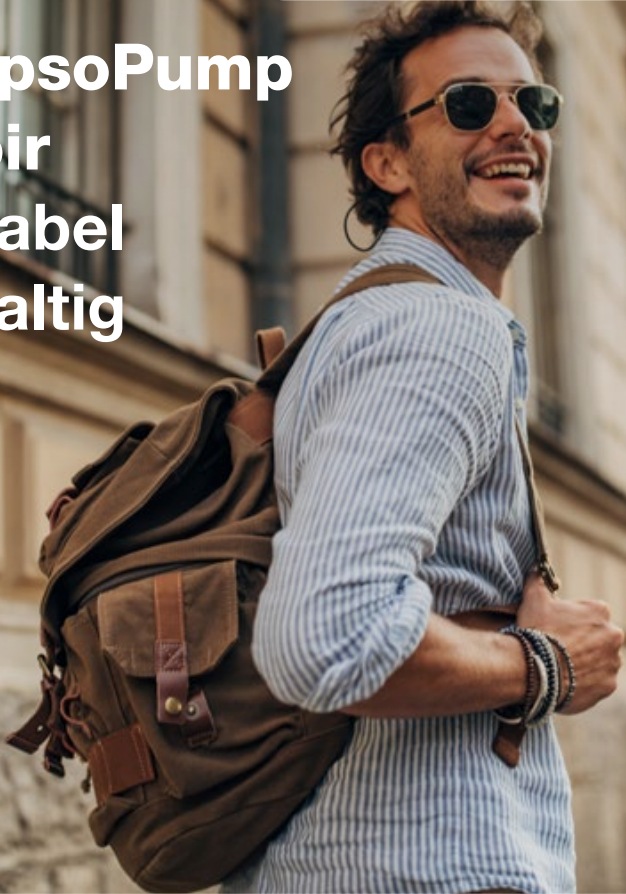

Nutzen Sie die Nachfülloption!

Damit können Sie:

- Müll reduzieren
- Wertvolle Ressourcen schonen




Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife.

So können Sie Ihr mylife YpsoPump Reservoir nachfüllen



Schritt 1: Neues Reservoir befüllen

- Öffnen Sie ein neues Reservoir.
- Befüllen Sie das neue Reservoir gemäß der Gebrauchsanweisung, kennzeichnen Sie es mit dem Fülldatum und lagern Sie es im Kühlschrank.
- **Lassen Sie den Transferadapter auf der Insulindurchstechflasche stecken.**
Gehen Sie direkt zu Schritt 2.

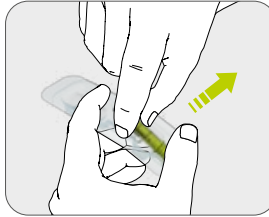


Schritt 2: Nachfüllen während des Gebrauchs

- Nehmen Sie das leere Reservoir aus Ihrer Pumpe.
- Füllen Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung wieder nach.
- Setzen Sie das nachgefüllte Reservoir anschließend wieder in Ihre Pumpe ein.
- Entsorgen Sie den Transferadapter.

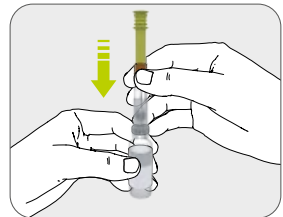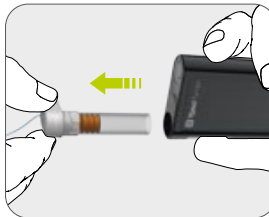

Schritt 3: Reservoir aus dem Kühlschrank tauschen

- Wenn das Reservoir in der Pumpe erneut leer ist, tauschen Sie es gegen das gefüllte Reservoir aus dem Kühlschrank.
- Entsorgen Sie das leere, bereits zweimal verwendete Reservoir.

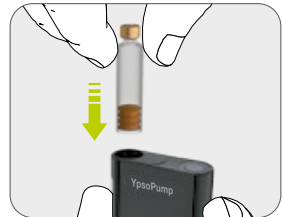

mylife YpsoPump Reservoir – Die nachhaltige Lösung

Das mylife YpsoPump Reservoir kann nach der ersten Verwendung innerhalb von 7 Tagen einmal nachgefüllt werden.

**Nachhaltig:**

Reduktion des Kunststoff- und Glasverbrauchs um bis zu 50 %

**Flexibel:**

Kompatibel mit einer großen Auswahl an schnellwirksamen Insulinen

**Benutzerfreundlich:**

Intuitive und einfache Handhabung durch einen unkomplizierten Nachfüllvorgang

**Zuverlässig und sicher:**

In der bewährten Qualität, die Sie von Ihrer mylife YpsoPump kennen

Weitere Informationen zur Verwendung des mylife YpsoPump Reservoirs finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf unserer Website:
www.mylife-diabetescare.de/reservoir
www.mylife-diabetescare.at/reservoir

**Jetzt Handhabungsvideo
ansehen und erfahren,
wie Sie Ihr Reservoir
doppelt so lange nutzen
können.**



Freiheit und Lebensfreude. Mit mylife.



Infusionssysteme



Infusionssets



Therapiemanagement



Reservoir /
Patronen

Mit mylife Diabetescare bietet Ypsomed Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Diabetes an. Damit wird Selbstbehandlung zur Selbstverständlichkeit.

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind eingetragene Marken der Ypsomed AG in verschiedenen Ländern. Andere Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung.

 Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder unter www.mylife-diabetescare.de/sicherheit oder www.mylife-diabetescare.at/sicherheit

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@mylife-diabetescare.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
service@mylife-diabetescare.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 0800 300 304