



Die erste Sicherheits-Pen-Nadel, die für eine sicherere Anwendung Schutz auf der Patienten- UND auf der Penseite bietet.



## 1. Vorbereitung der Injektion



A

Anbringen  
der Nadel



B

Spülen  
der Nadel



C

Ergreifen des Pens mit  
der Handfläche, Daumen  
nach oben



## 2. Injektionstechnik

Technik ohne Hautfalte (empfohlen bei 5 mm Nadel<sup>1)</sup>)

Keine  
Hautfalte  
und  
senkrechte  
Injektion  
(90°)



Falscher  
Winkel

<sup>1)</sup> Bilden Sie beim Risiko einer intramuskulären Injektion eine Hautfalte.

Technik mit Hautfalte (empfohlen bei 8 mm Nadel<sup>2)</sup>)

Breite  
Hautfalte  
und  
senkrechte  
Injektion  
(90°)



Hautfalte  
nicht breit  
genug  
Falscher  
Winkel

<sup>2)</sup> Bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer möglichen intramuskulären Injektion, kann auf das Bilden einer Hautfalte verzichtet werden.

Die Nadel ist vollständig in die Haut eingedrungen, wenn die weiße Abschirmung die Haut berührt.

Nach der Injektion mit dem Herausziehen der Nadel 10 Sekunden warten.



### 3. Automatische Doppelte Abschirmung



**Auf der Patientenseite** bestätigt ein **roter Markierungsring** die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus. Beim Abnehmen von der Haut arretiert die patientenseitige Abschirmung.



**Auf der Penseite** ist die Aktivierung des Schutzes an der zurückgesprungenen **orangefarbenen Abschirmung** zu erkennen, die die Nadel nach der Abnahme vom Pen abdeckt.



### 4. Sicherere Nadelentsorgung



Die Nadel ist an **beiden Seiten abgeschirmt**

Entsorgen Sie die gebrauchte Pen-Nadel in einem Abwurfbehälter



5 mm



Artikel-Nr. 329605 · PZN 7685521

8 mm



Artikel-Nr. 329608 · PZN 7685538

Die **BD AutoShield™ Duo** passt auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie.



**BD Medical**  
Diabetes Care  
Tullastraße 8-12  
69126 Heidelberg  
www.bddiabetes.de