



Die Bedienung – kurz und übersichtlich

Die richtige Dosis – sicher und einfach



Die Sicherheits- kappe

Sitzt fest, damit
sie sich nicht ver-
sehentlich öffnet.



Die BerliFine®- Kanüle mit Schutz- kappe

Durch ihren beson-
deren Schliff ist die
Kanüle beim Einstich
kaum spürbar.



Der Patronen- halter

An seiner Skala
können Sie ablesen,
wie viel Insulin noch
zur Verfügung steht.



Die Insulin- patrone

Achten Sie darauf,
dass Sie die Patrone
richtig herum ein-
setzen.

Bitte verwenden
Sie ausschließlich
Insulinpatrone der
BERLIN-CHEMIE AG!



Die Kolben- stange

Die Kolbenstange
drückt das Insulin
heraus.



Der Dosier- knopf

Dient zum sicheren
Dosieren durch
exaktes Einrasten
und deutliches
Klicken.*
Dosiskorrektur
durch einfaches
Zurückdrehen.

Made in Germany – Qualität aus Metall

Mit dem BerliPen® areo2 bietet Ihnen BERLIN-CHEMIE ein neues Präzisionsgerät, das speziell für die 3-ml-Insulinpatronen von BERLIN-CHEMIE entwickelt wurde. Der BerliPen® areo2 ist einfach in der Handhabung, präzise beim Dosieren und zuverlässig beim Injizieren. Dank der besonderen Kanülen ist die Injektion kaum zu spüren.

* Beim **BerliPen® areo2** können Sie jede beliebige Insulindosis in **1er-Schritten** bis **60 Einheiten** einstellen.

BerliPen areo2: Ihr zuverlässiger Begleiter, wenn's um Insulin geht.

- Besonders einfache und sichere Handhabung
- Injektion mit geringem Kraftaufwand
- Hochwertiges, attraktives Design



Sicherheitsclip
aus Edelstahl

Sicherheitskappe
schließt fest und
zuverlässig

Robustes
Metallgehäuse

Kurzer Pen in
elegantem Design
(15,2 cm)

Geringer Kraftaufwand
beim Injizieren

Große, gut lesbare
Dosiszahlen (3,4 mm)

Sichere Dosierung von 1–60
Einheiten in 1er-Schritten durch
exaktes und hörbares Einrasten

Dosiskorrektur durch einfaches
Zurückdrehen des Dosierknopfes

BERLIN-CHEMIE AG · Diabetes Service · Glienicker Weg 125 · 12489 Berlin

Injektion vorbereiten*

Wählen Sie eine Insulindosis
durch Drehen des Dosier-
knopfes vor.




Wenn Sie die Dosis gewählt
haben, muss die gewünschte
Einheitenzahl im Sichtfenster
unter dem Dosierknopf stehen.

Sollten Sie irrtümlich eine zu
hohe Dosis eingestellt haben,
können Sie den Dosierknopf
einfach zurückdrehen und die
gewünschte Dosis einstellen.


*Ausführliche Hinweise zur Hand-
habung Ihres BerliPen areo2 bzw.
Insulins s. entsprechende Gebrauchs-
information.

Mischen

Bei trüben Insulinen muss der Inhalt
der Insulinpatrone vor dem Spritzen
richtig durchmischt werden.

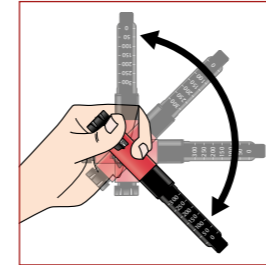

Dazu schwenken Sie den
BerliPen[®] areo2 mindestens
10-mal gleichmäßig auf und ab
und rollen ihn 10-mal zwischen
den Händen.

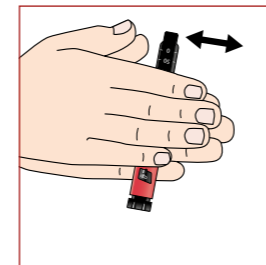

Setzen Sie nach dem Mischen die
Kanüle auf.


Pen zur Injektion mit Insulin- patronen der BERLIN-CHEMIE AG

Bei Verwendung von Insulinpatronen anderer
Anbieter wird keinerlei Haftung für die Sicher-
heit, Dosiergenauigkeit und Funktionsfähig-
keit sowie etwaige Schäden übernommen.

Injektion auslösen

Wenden Sie die Injektionstechnik
so an, wie es Ihnen vom Fach-
personal gezeigt wurde.

Nach dem Einstechen der
Kanüle unter die Haut drücken
Sie den Dosierknopf langsam
vollständig durch.

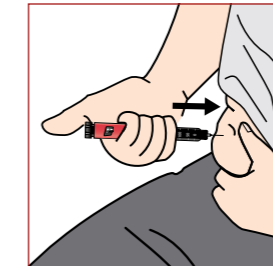

Vollständige Dosisabgabe

Um das Rückfließen von Insulin
aus der Einstichstelle zu vermei-
den, sollten Sie 5–10 Sekunden
mit gedrücktem Dosierknopf
warten und erst dann die Kanüle
aus der Haut ziehen.

Vergewissern Sie sich, dass
nach der Injektion auf der
Dosisanzeige „0“ angezeigt wird.



Bitte entsorgen Sie die Kanüle
verantwortungsbewusst, da-
mit sich Dritte nicht verletzen
können.

Jetzt nur noch die Sicherheits-
kappe aufstecken und den
BerliPen[®] areo2 bis zur nächsten
Injektion sicher verwahren.

Übrigens:

Die richtigen Nadeln für Ihren BerliPen[®] areo2 bekommen Sie bei
Ihrem Apotheker. Sie heißen BerliFine[®]-Kanülen.