



CONTOUR® XT Kurzanleitung

Einfach zu schulen und leicht zu bedienen

Neu
von Bayer



einfach **gewinnt**



Contour®
Blutzucker-
messgerät **XT**



Contour®
next Sensoren

Erleben Sie unsere neue Dimension der Messgenauigkeit

Das neue Blutzuckermessgerät CONTOUR® XT
und die neuen CONTOUR® NEXT Sensoren

- Einfach: Sensor einstecken, messen – und das präzise Ergebnis ablesen
- Anwenderfreundlich: Codiert automatisch, ist sekundenschnell und benötigt nur 0,6 µl Blut
- Sicher: Neue Technik sorgt für sehr hohe Messgenauigkeit

Ihr Vorteil: Je präziser die Messung,
desto genauer die Insulindosierung



CONTOUR® XT ist mit den
Sensoren CONTOUR NEXT®
zu verwenden



Sanfte Blutgewinnung mit der MICROLET® 2 Stechhilfe

- Sanft: Silikonbeschichtete Lanzetten
- Sicher: Benutzte Lanzetten einfach per Knopfdruck abwerfen
- Schlank: Passt in das Geräte-Etui

Kappe einfach
abknicken!



Benutzen Sie die graue Verschlusskappe für die Blutentnahme
aus der Fingerbeere.

Zur Verwendung mit MICROLET® Lanzetten farbig (100er und 200er).



einfach **gewinnt**



Contour®
Blutzucker-
messgerät **XT**




Contour®
next Sensoren

Ganz einfach messen

Einführen des Sensors CONTOUR® NEXT

Schieben Sie das graue Ende des Sensors in die Sensoröffnung des CONTOUR® XT. Das Gerät wird automatisch codiert.

Im Display erscheinen der Sensor und ein blinkender Blutstropfen.

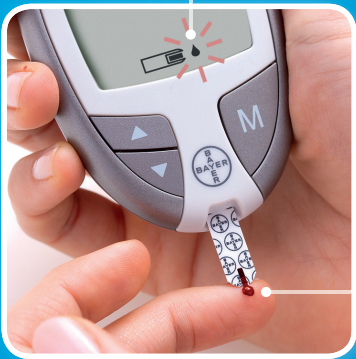

Durchführen der Blutzuckermessung

Halten Sie die Messöffnung des Sensors sofort an den Blutstropfen. Das Blut wird automatisch in den Sensor gesaugt. Mit dem Signalton beginnt das Herabzählen von 5 Sekunden.


Ihr Messergebnis wird angezeigt und automatisch gespeichert.

Zum Ausschalten einfach den Sensor aus dem Gerät ziehen und entsorgen.

Einstellung Basismodus (L-1) oder erweiterter Modus (L-2)

Das Messgerät ist auf den Basismodus voreingestellt. Möchten Sie den erweiterten Modus nutzen, stellen Sie das Gerät wie folgt ein:

- Drücken Sie **M**, um das Messgerät einzuschalten.
- Drücken Sie **▲** oder **▼** und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Auf der Anzeige blinkt L-1.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Gerät auf L-2 einzustellen.
- Drücken Sie **M**, um die Einstellung zu speichern.

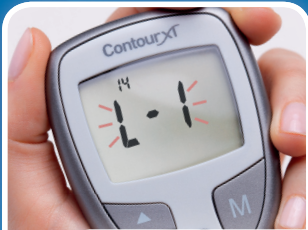

Basismodus (L-1)	Erweiterter Modus (L-2)
7 -Tage-Übersicht der hohen („HI“) und niedrigen („LO“) Messergebnisse	7-, 14- und 30-Tage-Mittelwerte
14 -Tage-Mittelwert	Vor- und Nach-Mahlzeit-Markierung
Speicher für 480 Messergebnisse	30 -Tage-Mittelwerte für Vor- und Nach-Mahlzeit-Messergebnisse
	Einstellbarer Nach-Mahlzeit-Alarm (2,5/2,0/1,5/1,0 Stunden)
	Individuelle Einstellungen für hohe und niedrige Messergebnisse

Die Funktionen im erweiterten Modus (L-2)

Im Level 2 macht CONTOUR® XT individuelles Diabetesmanagement noch einfacher.

- Individuell einstellbare HI/LO-Werte
- Individuell einstellbarer Signalton für die postprandiale Messung

In der Bedienungsanleitung finden Sie weitere Hinweise dazu, wie Sie den erweiterten Modus (L-2) in CONTOUR® XT zuschalten sowie Informationen zu Fehlermeldungen und deren Lösungen.



Erfahren Sie mehr unter www.bayerdiabetes.de oder beim Bayer Diabetes Service unter Telefon 0800 / 50 88 822 (kostenfrei)

80824386 03/12