



Contour[®]XT
Blutzuckermessgerät




**OHNE
CODIEREN[®]**




Kurzbedienungsanleitung

Ihr CONTOUR[®]XT Messgerät

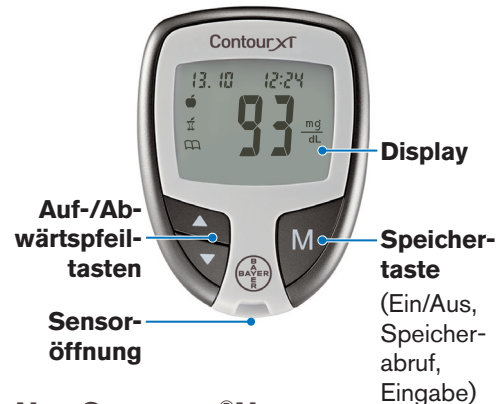




Nur CONTOUR[®]NEXT Sensoren verwenden

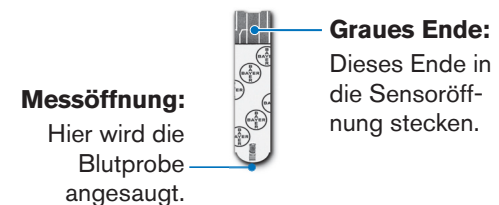


Einfache Messung Ausführliche Anweisungen entnehmen Sie bitte der CONTOUR[®]XT Bedienungsanleitung und der MICROLET[®]2 Packungsbeilage. **ACHTUNG:** Die Stechhilfe ist für den Gebrauch an nur einem Menschen mit Diabetes bestimmt.

Vorbereiten der Blutzuckermessung

1. Vor der Blutzuckermessung die Hände gründlich waschen und trocknen.
2. Das graue Ende des Sensors in die Sensoröffnung am Messgerät schieben.
3. Das Messgerät schaltet sich ein und sobald das Bild eines Sensors mit einem blinkenden Blutstropfen angezeigt wird, ist es bereit für die Messung.
4. Die Verschlusskappe von der MICROLET[®]2 Stechhilfe abnehmen.
5. Die Schutzkappe einer Lanzette um eine 1/4-Drehung lockern, aber nicht abnehmen.
6. Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe. Dadurch wird das Gerät einsatzbereit.

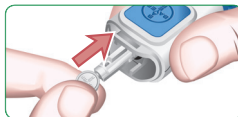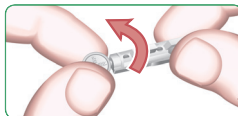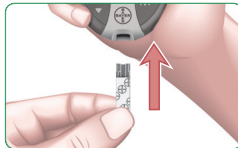


7. Die runde Schutzkappe der Lanzette abdrehen.

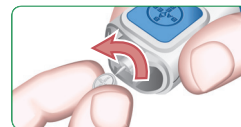

8. Vor dem Gewinnen des Blutstropfens die Verschlusskappe wieder anbringen.



9. Die Verschlusskappe so drehen, dass die gewünschte Einstichtiefe erzielt wird.

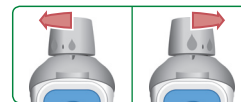


Gewinnen des Blutstropfens

1. Die Verschlusskappe fest gegen die Einstichstelle drücken und mit dem Daumen den blauen Auslöseknopf drücken.
2. Von der Hand zur Einstichstelle am Finger streichen, um dort einen Blutstropfen zu bilden.




Durchführen der Blutzuckermessung

1. Nur CONTOUR NEXT Sensoren mit dem CONTOUR XT Messgerät verwenden.
2. Die Spitze des Sensors an den Blutstropfen halten. Das Blut wird in den Sensor eingesaugt.
3. Die Spitze des Sensors so lange an den Blutstropfen halten, bis der Signalton ausgegeben wird.
4. Nach dem 5-Sekunden-Countdown wird das Messergebnis angezeigt.
5. Den Sensor herausnehmen, um das Messgerät auszuschalten.

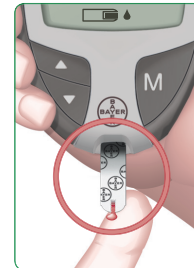


Gewinnen des Blutstropfens an der Fingerbeere

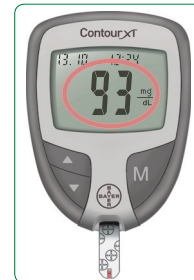

Entfernen der benutzten Lanzette

1. Halten Sie die Stechhilfe in einer Hand und den Daumen in der Haltevertiefung. Mit der anderen Hand halten Sie die Verschlusskappe am Einstellring fest und ziehen diese vorsichtig nach unten ab.
2. Die runde Schutzkappe mit dem Bayer-Logo nach unten auf eine ebene Oberfläche legen.
3. Drücken Sie die sich noch immer in der Stechhilfe befindliche Lanzette vollständig in die Mitte der Lanzettenschutzkappe.
4. Die Lanzette gemäß den Anweisungen in der Packungsbeilage der Lanzetten in einen Behälter auswerfen.
5. Die Verschlusskappe wieder anbringen.

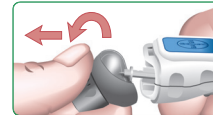



Potenzielle Infektionsgefahr

Alle Blutzuckermessgeräte sind als potenziell infektiöses Material zu behandeln.

Medizinisches Fachpersonal und alle Personen, die dieses System an mehreren Patienten benutzen, müssen die von ihrer Einrichtung vorgeschriebenen Hygienevorschriften befolgen.

Alle Produkte oder Gegenstände, die mit menschlichem Blut in Berührung kommen, müssen (selbst nach der Reinigung) so behandelt werden, als könnten sie infektiöse Erkrankungen übertragen.

Verwendung des erweiterten Modus

Einstellen des Messgeräts auf den erweiterten Modus

Zum Wechseln in den erweiterten Modus, in dem Mahlzeitmarkierungen und andere Funktionen verfügbar sind:

1. Die Taste **M** drücken, um das Messgerät einzuschalten.
2. Die Taste **▲** oder **▼** 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. L-1 blinkt.
4. Die Taste **▲** oder **▼** drücken, um in den L-2-Modus zu wechseln.
5. Zur Bestätigung der Wahl **M** drücken.




Für Ihre Fragen im Umgang mit dem Blutzuckermesssystem stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen im Bayer Diabetes Service gerne zur Verfügung.

Deutschland: Telefonnummer 0800 7261880 (kostenfrei) oder per E-Mail unter info@bayerdiabetes.de

Belgien: Telefonnummer 0800 97 212 oder per E-Mail unter info@bayerdiabetes.be

Nach Durchführung einer Messung können die auf der Anzeige eingeblendeten Markierungen für die Ergebnisse verwendet werden:

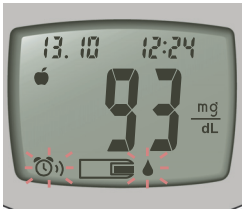GEWÜNSCHTE MARKIERUNG	SIE SEHEN	AKTIVIEREN	SIE SEHEN	BEDEUTUNG	VERWENDUNG DER ERINNERUNGSFUNKTION
Vor der Mahlzeit Markierung für Messergebnisse, die vor einer Mahlzeit bestimmt wurden. ▲ oder ▼ drücken	 (Blinkt)	M drücken		Wert ist als Vor-der-Mahlzeit-Messergebnis markiert. M erneut drücken, um eine Erinnerung für die Messung nach der Mahlzeit einzurichten.	Wenn das Erinnerungssignal ertönt, schaltet sich das Messgerät ein und das vor der Mahlzeit gewonnene Messergebnis wird angezeigt. 
Nach der Mahlzeit Markierung für Messergebnisse, die nach einer Mahlzeit bestimmt wurden. ▲ oder ▼ drücken	 (Blinkt)	M drücken		Wert ist als Nach-der-Mahlzeit-Messergebnis markiert.	Eine beliebige Taste drücken, um den Signalton stumm zu schalten, oder zweimal drücken, um das Messgerät auszuschalten.
Tagebuch Markierung von außerordentlichen Ergebnissen. ▲ oder ▼ drücken	 (Blinkt)	M drücken		Wert ist im Speicher als außerordentliches Messergebnis markiert. Dieses Ergebnis sollte im Tagebuch vermerkt werden.	Eine weitere Blutzuckermessung durchführen und diese mit der  Nach-der-Mahlzeit-Markierung kennzeichnen (siehe Tabelle links).
 Setzt eine Erinnerung (vorgegebene Einstellung ist 2 Stunden) für die Durchführung der Messung nach der Mahlzeit. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung der Markierungen und zum Einstellen der Erinnerungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.					

Fehlermeldungen und Lösungen

Eine vollständige Liste der Fehlermeldungen und Lösungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

E1 	Temperatur außerhalb des Betriebsbereichs.
E2 	Sensor konnte nicht vollständig gefüllt werden. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.
E3 	Das Messgerät registriert einen gebrauchten Sensor oder es wurde die falsche Kontrolllösung verwendet. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.
E11	Abnormales Ergebnis. Die Messung mit einem neuen Sensor wiederholen.



Bayer HealthCare

Vertrieb durch
Bayer Vital GmbH
Diabetes Care
51368 Leverkusen
Deutschland:
Telefonnummer
0800 7261880 (kostenfrei)

Bayer NV – SA
14 J.E. Mommaertsiaan
1831 Diegem (Machelen)
Belgien
0800 97 212
info@bayerdiabetes.be
www.bayerdiabetes.be



Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland



Bayer

84162125
Rev. 10/11