

Kısa Kullanım Kılavuzu – BG★STAR® ile kan şekeri ölçümü



- ★ **Kod tayini** gerekli değildir
- ★ **Numune hacmi** – 0,5 µL
- ★ **Test süresi** – 6 saniye*
- ★ **Hafıza** – 1.865 ölçüm değeri

* ortalama ölçüm süresi

Bu kısa talimat sadece bir kılavuzdur. BGStar®'ı ilk kez kullanmadan önce prospektüsünü dikkatlice okuyunuz.


1



Test çubuğunun takılması

- ★ Test çubuğunu kontakları yukarı gelecek biçimde test çubuğu yuvasına itin. Ölçme cihazı otomatik olarak açılır.
- ★ **DİKKAT:** Doğru sonuçlar alınmasını sağlamak amacı ile her testten önce ellerinizi sıcak sabunlu su ile yıkayıp kurulayınız.

2

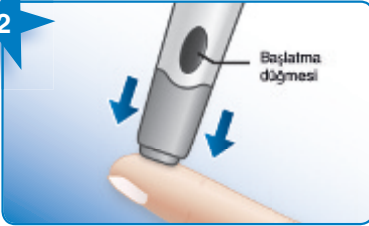

İğne batırma yeri

- ★ Delme aletinin hazırlanması ile ilgili talimatlara dikkat ediniz. Delme aleti ile ilgili talimatları BGStar® ambalajında veya arka tarafta bulabilirsiniz.
- ★ Delme aletini uygun gördüğünüz yere batırınız.
- ★ Başlatma düğmesine basınız. Kan alımı için vücudun farklı yerleri ile ilgili açıklamaları kullanım talimatında bulabilirsiniz.

3



Test çubuğunu kan numunesine doğru tutun

- ★ Test çubuğu kan numunesini numune alanından geçirerek içine alır.

4



Dıt sesi geldiğinde test çubuğunu kan numunesinden çekin

- ★ Test çubuğunun numune alanına kan girişi durduğunda, ölçüm cihazı bir dıt sesi çıkarır. İlerleme çubuğu ve »1-2-3« göstergesi ölçüm cihazının sonuçları hesapladığını gösterir.


5




Son adımlar

- ★ Zaman ve tarih ile birlikte kan şekeri test sonucu ekranda belirdiğinde, test sona ermiş demektir. »Onayla« tuşuna basarak yemek saatleri işaretlemesini onayladığınızda işaretin yanıp sönmeyeceği durur.
- ★ Kullanılan test çubuğunu çıkartınız. Kan şekeri ölçüm cihazı otomatik olarak kapanır. Delme aletinin kapağını çıkartıp lanset kapağını lansete takınız.
- ★ Kullanılan iğneyi çıkartıp usulüne uygun biçimde atığa ayırınız.


Delme aletinin hazırlanması

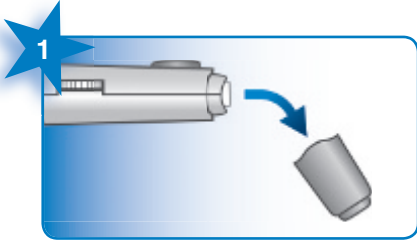


Delme aletinin ucundaki kapağı çıkartınız.

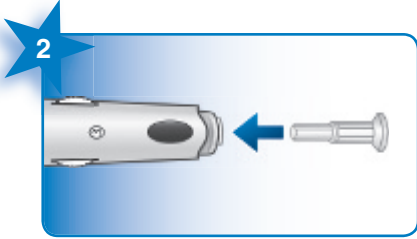


Yeni lanseti, lanset yuvasına yerleştiriniz.

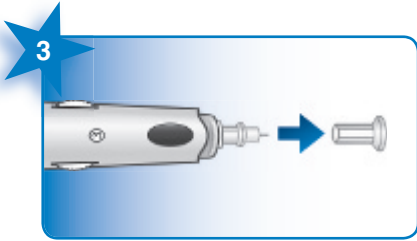


Lansetin kafasını çeviriniz.

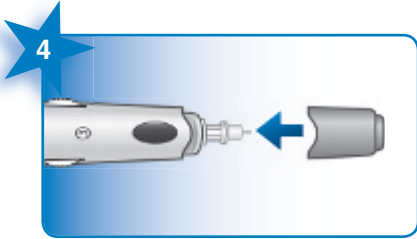

Delme aletinin kapağını tekrar kapatınız.

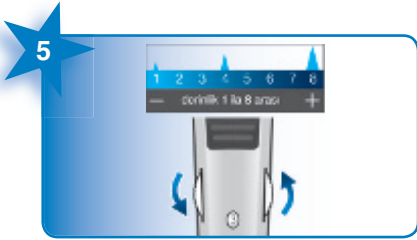

Delme derinliğini ayarlayınız.

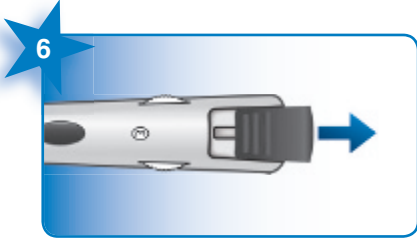

Tık edene kadar germe tertibatını çekiniz.



0180 22 22 010

(Alm. sabit hatlından arama ücreti 6 ct./arama, cep telefonundan arama ücreti maks. 42 ct./dak.)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

www.bgstar.de

Diyabet Hizmet Merkeziniz

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

ServiceCenter Diabetes

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

325182-019907

sanofi aventis
Das Wichtigste ist die Gesundheit