



# Установка патрона

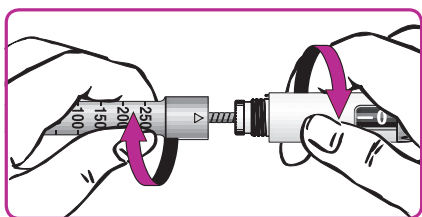


Пожалуйста, сначала проверьте, имеется ли подходящий Вам инсулин.


- A** Отвинтите гильзу патрона от корпуса устройства.  
Удалите при необходимости пустой инсулиновый патрон.

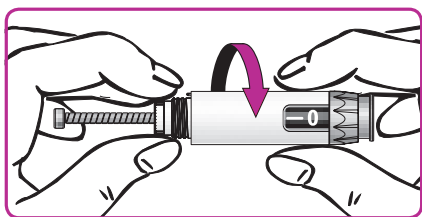


- B** Завинтите резьбовой стержень в исходную позицию.
  - ▶ Удерживая кольцо резьбового стержня, вращайте корпус до упора.
  - ▶ **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** переместить резьбовой стержень назад.

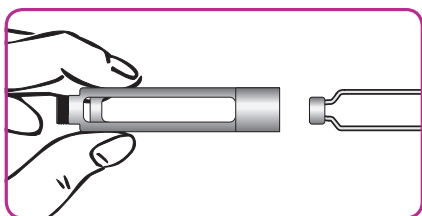

- C** Вставьте новый патрон.
  - ▶ Убедитесь, что Вы используете подходящий инсулин, и только после этого установите патрон.

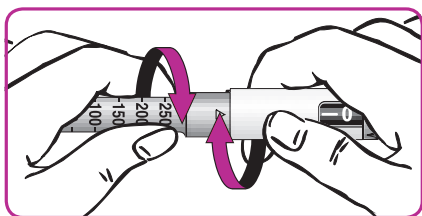

- D** Снова завинтите гильзу патрона в корпус устройства.

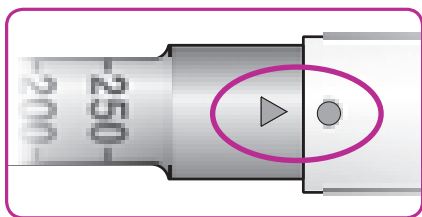

**Метки должны совпадать.**

Если этого не произошло, повторите процедуру, начиная с пункта А.

Если Вам не удастся установить патрон, убедитесь

- ▶ что патрон вставлен правильной стороной
- ▶ что резьбовой стержень полностью завинчен.

**ЕСЛИ** у Вас возникли другие проблемы в обращении с устройством, попробуйте сначала заменить иглу и повторить проверку безопасности.

Устройство TactiPen® предназначено исключительно для личного пользования.

Указания по хранению и обращению с патронами приводятся в памятке, прилагаемой к инсулиновым патронам.


Всегда предусматривайте альтернативную возможность ввода инсулина на случай, если Вы потеряете или повредите Ваш TactiPen®.

Для каждой инъекции используйте новую иглу.

# Инъекция инсулина

## **ВАЖНО:** Перемешивайте инсулиновые суспензии!


### 1 ▶ Установка иглы

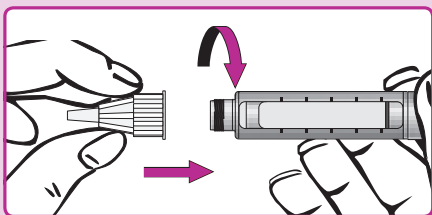

Пожалуйста, сначала проверьте, имеется ли подходящий Вам инсулин.

- A** Установите иглу в прямом положении.

### 2 ▶ Проверка безопасности

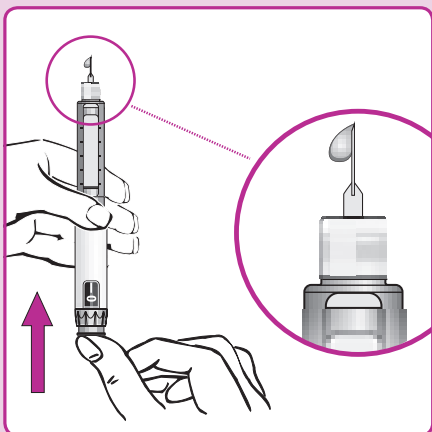


Перед каждой инъекцией выполняйте проверку безопасности для удаления воздушных пузырьков и обеспечения правильного функционирования самого устройства и иглы.

- A** Установите дозу в 2 единицы и снимите с иглы защитный колпачок.  
**B** Удерживая устройство иглой вверх, надавите на инъекционную кнопку до упора.  
**C** Убедитесь, что на острие иглы выступил инсулин.

- ▶ Если инсулин не выступает, повторяйте проверку до тех пор, пока не выступит инсулин.
- ▶ Если инсулин не выступит после трехкратной проверки безопасности, проверьте, правильно ли установлен патрон, и снова повторите проверку.
- ▶ Если и после этого инсулин не выступает, замените патрон и начните процедуру с самого начала.

### 3 ▶ Настройка дозировки

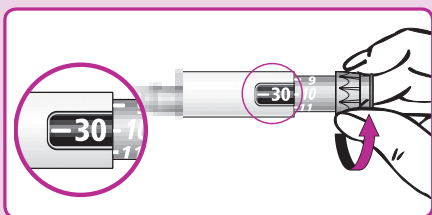


- A** Поворачивая инъекционную кнопку, установите дозировку.

На рисунке в качестве примера выбрана доза в 30 единиц.


Ваша доза может отличаться от этого значения. ЕСЛИ Вам НЕ удастся установить нужную дозу, проверьте, имеется ли в патроне достаточно инсулина.

### 4 ▶ Введение дозы

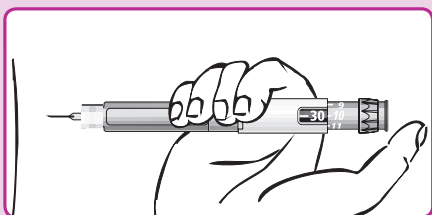


Используйте технику инъекции, показанную Вам врачом.

- A** Воткните иглу

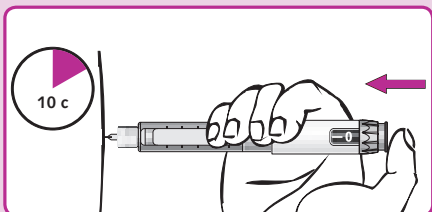

- B** Надавите на инъекционную кнопку до упора. При этом число в дозировочном окошке сбрасывается до "0".  
**C** Удерживайте инъекционную кнопку полностью нажатой. Медленно сосчитайте до 10, прежде чем вынуть иглу.

### 5 ▶ Удаление иглы

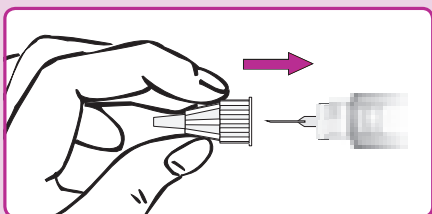

- A** Наденьте на иглу защитный колпачок и с его помощью отвинтите иглу.  
**B** Утилизируйте иглу с соблюдением требований безопасности (например, в плотном пакете, исключающем прокалывание).  
**C** Наденьте колпачок на устройство.