

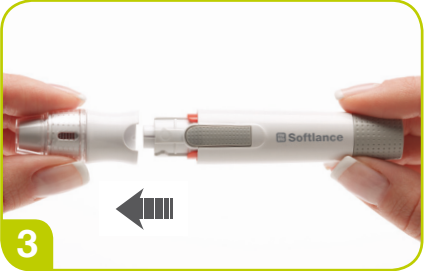
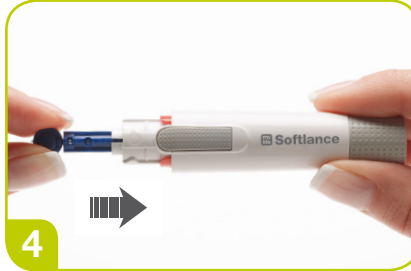






Vorbereitung

-  Hände waschen und abtrocknen
-  Lanzettengerät leicht knicken
-  Kappe abnehmen
-  Lanzette einstecken
-  Schutzkappe abdrehen
-  Kappe aufsetzen
-  Einstichtiefe einstellen
-  Lanzettengerät spannen

Blutzuckermessung



-  Teststreifen aus Dose entnehmen und Dose schließen
-  Teststreifen einlegen
-  Teststreifensymbol blinkt
-  Einstich mit der Lanzette
-  Auftragen des Blutes
-  Gerät zählt von 5 rückwärts
-  Messwert ablesen
-  Sauberes Entfernen des Teststreifens ohne Blutkontakt
-  Sauberes Entfernen der Lanzette ohne Blutkontakt

