


Краткая инструкция по применению

Это – сокращенная инструкция по использованию. Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по применению, прилагаемую к каждой упаковке «JuniorSTAR®».


1. Вставить картридж

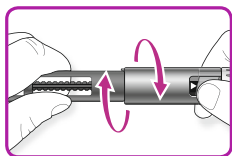

A Снимите колпачок шприц-ручки.

B Снимите держатель картриджа с корпуса, отвинтив его.

– Извлеките в соответствующем случае пустой инсулиновый картридж.

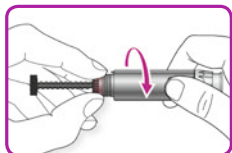


C Осторожно поверните резьбовой шток полностью в исходное положение обратно.

– Нажмите на кнопку спуска до упора, если в дозировочном окне не стоит «0».

– Удерживайте кольцо резьбового штока в зафиксированном положении.


– Поверните **корпус** до упора против часовой стрелки; при этом резьбовой шток заворачивается полностью обратно.

✧ **Не пытайтесь передвигать резьбовой шток назад.**

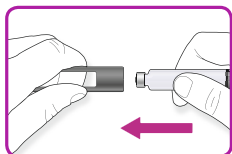

D Вставьте новый картридж.

– Убедитесь в том, что Вы используете правильный тип инсулина и после этого вставьте новый картридж.

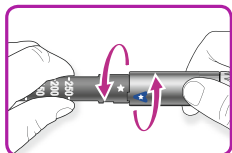

E Привинтите держатель картриджа снова прочно к корпусу.




Внимание: маркировки на держателе картриджа и на корпусе должны располагаться точно напротив друг друга. В противном случае повторите все действия, начиная с этапа C.

Если картридж не вставляется, тогда следует проверить:

- ✧ вставлен ли картридж правильной стороной.
- ✧ Полностью ли завинчен обратно резьбовой шток.
- ✧ Ни в коем случае не прибегать к применению силы.

2. Присоединить иглу

✧ Проверьте сначала, действительно ли используется правильный тип инсулина.

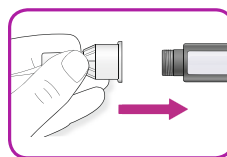


A Присоедините прямолинейно иглу.

– Проследите за тем, что игла была прочно зафиксирована (в зависимости от типа игла закручивается или насаживается).

3. Выполнить проверку безопасности

✧ **Перед каждым введением инсулина следует проводить проверку безопасности, чтобы удалить пузырьки воздуха и проверить надлежащее функционирование шприц-ручки и иглы.**

A Установите посредством поворачивания дозирующего кольца **2 единицы** и снимите защитные колпачки с иглы.

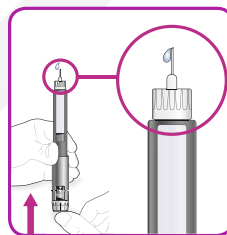

B Удерживая шприц-ручку в вертикальном положении иглой вверх, нажмите на кнопку спуска до упора.

C Проверьте, выступает ли инсулин из кончика иглы.



Внимание: возможно, Вам придется повторить несколько раз проверку безопасности, пока инсулин не появится из кончика иглы. Если после трехразового проведения проверки безопасности инсулин не появляется:



- ✧ **замените иглу и выполните проверку безопасности снова.**
- ✧ Проверьте, правильно ли вставлен картридж и нет ли каких-либо повреждений.
- ✧ Повторите проверку безопасности.

4. Установить дозировку



А Проследите за тем, чтобы после проверки безопасности в дозировочном окне стояла цифра «0».

В Поворачивая кнопку спуска, установите требуемую дозу. На демонстрируемом примере выбранная доза составляет 15,5 единиц. Ваша доза может отличаться от этого объема.

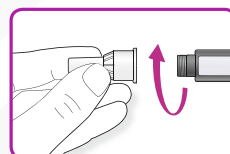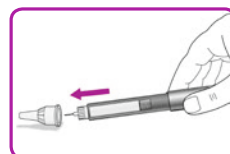

6. Снять иглу

А Положите наружный защитный колпачок для иглы на ровную поверхность. Введите иглу в наружный защитный колпачок для иглы.

Чтобы избежать случайных повреждений при контакте с иглой, не пытайтесь надеть на иглу снова внутренний защитный колпачок для иглы.


В Сожмите слегка наружный защитный колпачок для иглы в целях захвата иглы и **отвинтите** с помощью колпачка **иглу от шприц-ручки «JuniorSTAR»**, удерживая при этом в фиксированном положении шприц-ручку за держатель картриджа.

С Утилизируйте иглу, соблюдая правила безопасности (напр., в непрокальваемой емкости).

Д Шприц-ручку следует хранить в надежном месте, **всегда с надетым колпачком**.


5. Ввести дозу

★ Применяйте технику введения инсулина в соответствии с инструкциями, полученными Вами от квалифицированного медицинского персонала.

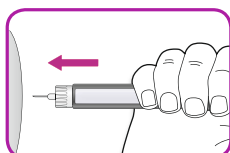

А Введите иглу в кожу.

В Введите установленную дозу, нажимая медленно на кнопку спуска до упора. Индикация в дозировочном окне возвращается снова к цифре «0».

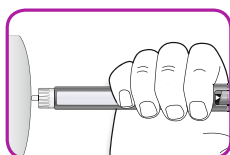

С Удерживайте кнопку спуска в нажатом до упора положении.
– Посчитайте медленно до 10 перед извлечением иглы из кожи.



Внимание: соблюдайте особую осторожность во время введения инсулина другому лицу, чтобы избежать случайных ранений иглой и инфекционного заражения.

Соблюдайте рекомендации по правилам безопасности для снятия и утилизации иглы (напр., техника выполнения одной рукой) в целях сокращения риска случайного ранения иглой и передачи инфекционных заболеваний.



0180 22 22 010

(стоимость телефонного звонка из стационарной сети в Германии 6 центов за звонок, из сетей мобильной связи макс. 42 цента за минуту)

Sanofi Aventis Deutschland GmbH

Сотрудники сервисного центра по вопросам диабета охотно ответят Вам на Ваши вопросы. С дополнительной информацией Вы можете ознакомиться также в Интернете на сайте: www.juniorstar.de.



Изготовитель шприц-ручки:
Haselmeier GmbH

SANOFI DIABETES
Zusammen erreichen wir mehr.



033383